

Notice d'entretien des Corsets et ceintures orthopédiques sur mesure :

Cet article est un dispositif réalisé **sur mesure**. Il ne peut convenir à une autre personne que celle pour laquelle il a été conçu et ne peut servir que pour la pathologie pour laquelle il a été prescrit.

- Il doit être mis en place comme indiqué par votre orthésiste lors de sa délivrance
- Il doit être porté **en fonction des indications données** par votre médecin ou votre orthésiste (port continu ou non, nocturne ou diurne, ...)
- Il peut être desserré la nuit si un port nocturne est indiqué.
- En cas de problème (douleur, rougeur, gêne, intolérance, ...) veuillez **recontacter au plus vite** votre orthopédiste.
- Laver régulièrement l'appareillage au savon et à l'eau **froide** pour les corsets rigides, tiède pour les ceintures et corsets en tissu.
- Sécher **uniquement** avec un tissu sec ou un essuie tout pour les corsets rigides, à l'air libre pour les ceintures et corsets en tissu.
- **Eviter toute exposition à une source de chaleur** (sèche-cheveux, lave-linge, sèche-linge, radiateur, cheminée, ...)
- Ne pas laisser dans votre véhicule, en particulier l'été.

Une mise de secours peut être prise en charge lors de la 1^{ère} attribution.

Renouvellement : tous les ans

Garantie : 6 mois.