

Notice d'entretien des Orthèses thermoformées du membre supérieur

Cet article est un dispositif réalisé **sur mesure**. Il ne peut convenir à une autre personne que celle pour laquelle il a été conçu et ne peut servir que pour la pathologie pour laquelle il a été prescrit.

- Il doit être mis en place comme indiqué par votre orthésiste lors de sa délivrance
- En cas de problème (douleur, rougeur, gêne, intolérance, ...) veuillez **nous recontacter au plus vite**.
- Laver régulièrement l'orthèse au savon et à l'eau **froide**.
- Sécher **uniquement** avec un tissu sec ou un essuie tout.
- **Eviter toute exposition à une source de chaleur** (sèche-cheveux, lave-linge, sèche-linge, radiateur, cheminée, ...)
- Ne pas laisser dans votre véhicule, en particulier l'été.

Renouvellement possible en cas de changement morphologique ou pathologique du patient.

Garantie : 6 mois.