

Notice d'entretien des Orthèses plantaires ou semelles orthopédiques:

Cet article est un dispositif réalisé **sur mesure**. Il ne peut convenir à une autre personne que celle pour laquelle il a été conçu et ne peut servir que pour la pathologie pour laquelle il a été prescrit.

- Il doit être mis en place comme indiqué par votre orthopédiste lors de sa délivrance
- Si une douleur ou une gêne persistait au-delà de quelques jours, veuillez recontacter votre orthopédiste.
- Retirez les des chaussures pour la nuit, afin de les aérer
- Lavage régulier avec une éponge **humide** et un savon doux.
- Essuyez avec un tissu sec puis laissez sécher à **l'air libre**.
- **Eviter toute exposition à une source de chaleur** (sèche-cheveux, lave-linge, sèche-linge, radiateur, cheminée, ...)
- Ne pas laisser dans votre véhicule, en particulier l'été.

Renouvellement tous les 6 mois jusqu'à 15 ans puis tous les ans au-delà de 15 ans.

Garantie : 6 mois